

## Wichtige Hinweise

### Navina Mini

#### Verwendungszweck

Navina Mini ist dazu bestimmt, eine transanale Irrigation durchzuführen, bei der eine geringe Menge Wasser über einen Einweg-Rektalkonus in das Rektum eingeleitet wird.

#### Indikationen

Navina Mini ist für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab einem Alter von 3 Jahren geeignet, die unter unvollständiger Stuhlentleerung und/oder Stuhlinkontinenz leiden.

#### Kontraindikationen

Bitte verwenden Sie Navina Mini **NICHT**, wenn Sie eine oder mehrere der folgenden Bedingungen aufweisen:

- Bekannte Analstenose
- Aktive entzündliche Darmerkrankung
- Akute Divertikulitis und divertikulärer Abszess
- Kolorektaler Krebs
- Ischämische Kolitis
- Innerhalb von 3 Monaten nach einer analen oder kolorektalen Operation

Da diese Aufzählung der Gegenanzeigen möglicherweise nicht abschliessend ist, sollten das medizinische Fachpersonal und Pflegepersonal stets individuelle Faktoren in Betracht ziehen.

## Navina Classic und Smart

### Anwendungszweck

Das Navina-Spülsystem ist für die Durchführung einer transanal Irrigation bestimmt, bei der Wasser mittels eines Rektalkatheters in den unteren Teil des Dickdarms eingeführt wird.

### Indikationen

Das Navina Irrigationssystem ist geeignet für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren, die unter Stuhlinkontinenz, chronischer Verstopfung und/oder zeitaufwändigem Darmmanagement leiden. Durch die Zufuhr von Wasser in den unteren Dickdarm wird die Darmperistaltik stimuliert, was zur Entleerung des unteren Dickdarms und des Rektums führt.

### Kontraindikationen

Bitte verwenden Sie das Navina Irrigationssystem **NICHT**, wenn Sie eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllen:

- Bekannte anale oder kolorektale Stenose
- Aktive entzündliche Darmerkrankung
- Akute Divertikulitis
- Kolorektaler Krebs
- Ischämische Kolitis
- Innerhalb der letzten drei Monate eine anale oder kolorektale Operation durchgeführt wurde
- Innerhalb der letzten 4 Wochen eine endoskopische Polypektomie durchgeführt wurde

Da diese Aufzählung nicht abschliessend ist, wird das medizinische Fachpersonal immer auch die individuellen Gegebenheiten der Anwender berücksichtigen. Vor der Anwendung lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig.