

Étui pénien urinaire : Instructions et Informations

Description/indications

L'étui pénien urinaire est un système d'évacuation de l'urine pour les hommes souffrant d'incontinence urinaire qui est déroulé sur le pénis comme un préservatif. L'ouverture en forme d'entonnoir permet d'évacuer l'urine dans la poche de recueil.

Contre-indication

Veillez ne pas utiliser l'étui pénien sur une peau irritée ou blessée. Le matériau transparent permet un contrôle continu de la peau. En cas de rougeur ou d'autres changements cutanés, cessez d'utiliser l'étui pénien pendant la durée de la cicatrisation.

Domaines d'application



Mobilité | pour maintenir une activité physique

Le sac à urine peut être attaché à la cuisse au moyen d'une lanière de fixation pour jambe. La lanière pour jambe est tirée à travers les perforations du sac à urine et peut être ajustée pour s'adapter à la circonférence de la cuisse.

Cela vous permet de vous déplacer sans être dérangé dans la vie quotidienne sans vous sentir limité, que vous soyez à pied ou en fauteuil roulant.



Avec Fixation de lit | pour un sommeil tranquille

Un sac à urine muni d'un tube plus long peut être fixé au lit pour la nuit à l'aide d'un support de sac de lit approprié.

Veillez à ce que le sac à urine soit placé sous le niveau de la vessie afin que l'urine puisse s'écouler librement.



Dans le domaine du sport | pour soutenir ou compléter

Les étuis péniers sont également utilisés dans divers sports, tels que le parapente, le vol à voile ou la plongée en combinaison sèche.

Aucun sac à urine n'est nécessaire pour les sports suivants :

Parapente : Pour l'évacuation libre de l'urine, un tuyau est relié à l'étui pénien par un adaptateur et drainé par le harnais.

Plongée : L'étui pénien est relié à la valve intégrée dans la combinaison étanche.

Préparation

Avant l'utilisation, lavez le pénis à l'eau chaude et au savon doux. Séchez-vous soigneusement.

Lors de la mise en place de l'étui pénien, veillez à ce que la peau soit exempte de graisse, sinon l'étui pénien n'adhérera pas bien.

Si nécessaire, rasez la zone autour de la base du pénis afin qu'aucun poil n'adhère à la surface adhésive de l'étui pénien.

Fixation de l'étui pénien



Style 1


Style 2 und 3



Ouvrez l'emballage au niveau de la perforation, retirez l'étui pénien au niveau de la sortie en forme d'entonnoir.

Style 2 et 3:

Pour retirer l'insert en plastique, appuyez sur l'étui pénien à l'extrémité du cône blanc et retirez-le.

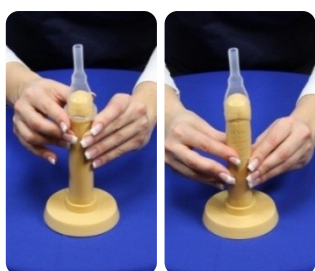

Placez l'étui pénien enroulé sur le bout du pénis.

Il reste un peu d'espace entre le bout du pénis et le drain.

Déroulez maintenant l'étui pénien à l'envers, le prépuce n'est pas rétracté..



Une fois que le l'étui pénien est complètement déroulé, appuyez doucement et fermement pendant environ 30 secondes. La chaleur corporelle augmente l'adhérence du revêtement adhésif hydrocollide

Raccordement et fixation de la poche à urine



Vous pouvez ensuite connecter l'adaptateur de la poche à urine à la sortie en forme d'entonnoir de l'étui pénien et attacher la poche à urine à la jambe. Enfin, vous pouvez mettre les sous-vêtements par-dessus comme d'habitude.

Fixation de la poche à urine:

- Sur la jambe supérieure ou inférieure, selon la longueur du tuyau
- Au moyen d'un sac à urine ou d'une lanière de fixation pour jambe

Veillez à ce qu'il n'y ait pas de pli lorsque l'étui pénien est vide, afin que l'urine puisse s'évacuer librement. Sinon, si l'urine refoule, l'étui pénien peut se détacher au bout d'un certain temps.

Retrait de l'étui pénien

L'étui pénien est conçu pour une adhérence d'environ 24 heures. Il n'est donc pas encore facile à retirer après une courte durée de port de quelques heures.

Avant de le dérouler, placez une compresse/un gant de toilette humide autour de l'étui pénien ou humidifiez-le avec de l'eau tiède. Il est ainsi plus facile de dissoudre l'adhésif. Vous pouvez également retirer l'étui pénien directement sous la douche ou dans la baignoire.

Si l'adhésif ne s'enlève toujours pas bien, nous disposons de produits spéciaux pour enlever l'adhésif.

Vous pouvez commander par téléphone au 061 487 99 11 / e-mail office@rehatec.ch ou directement dans notre boutique en ligne www.inko-reha.ch.