

Informations importantes

Navina Mini

Usage prévu

Navina Mini est destiné à réaliser une irrigation transanale en introduisant une petite quantité d'eau dans le rectum via un cône rectal à usage unique.

Indications

Navina Mini est indiqué pour les adultes, les adolescents et les enfants à partir de l'âge de 3 ans qui souffrent d'une évacuation incomplète des selles et/ou d'incontinence fécale.

Contre-indications

Veillez **NE PAS** utiliser Navina Mini si vous présentez une ou plusieurs des conditions suivantes :

- Sténose anale connue
- Maladie inflammatoire active de l'intestin
- Diverticulite aiguë et abcès diverticulaire
- Cancer colorectal
- Colite ischémique
- Dans les 3 mois suivant une opération anale ou colorectale

Cette liste de contre-indications n'étant peut-être pas exhaustive, les professionnels de la santé et le personnel soignant doivent toujours prendre en compte les facteurs individuels.

Navina Classic et Smart

But de l'utilisation

Le système d'irrigation Navina est destiné à la réalisation d'une irrigation transanale, qui consiste à introduire de l'eau dans la partie inférieure du gros intestin au moyen d'une sonde rectale.

Indications

Le système d'irrigation Navina convient aux adultes et aux enfants à partir de 3 ans qui souffrent d'incontinence fécale, de constipation chronique et/ou de gestion du transit intestinal qui prend du temps. L'apport d'eau dans le côlon inférieur permet de stimuler le péristaltisme intestinal, ce qui entraîne la vidange du côlon inférieur et du rectum.

Contre-indications

Veillez **NE PAS** utiliser le système d'irrigation Navina si vous remplissez une ou plusieurs des conditions suivantes :

- Sténose anale ou colorectale connue
- Maladie inflammatoire active de l'intestin
- Diverticulite aiguë
- Cancer colorectal
- Colite ischémique
- Opération anale ou colorectale effectuée au cours des trois derniers mois
- Une polypectomie endoscopique a été effectuée au cours des 4 dernières semaines.

Cette liste n'étant pas exhaustive, le personnel médical spécialisé tiendra toujours compte de la situation individuelle de l'utilisateur. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement le mode d'emploi.